


# INFORMATION FÜR DEN KUNDEN

## UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER HISTOLOGIE

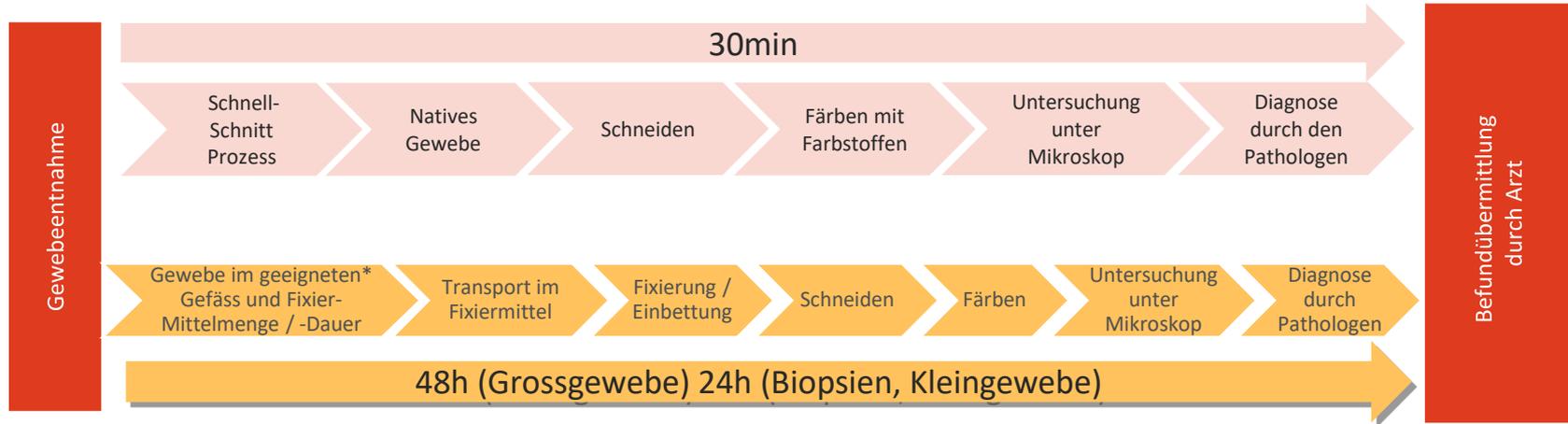

\*: Siehe nachfolgende Seite. Bestellung bei e-Unilabs: [Link](#).

Fixierungsdauer 6 – 72h für Biopsien / Kleingewebe und 24 – 72h für Grossgewebe.

Bei Raumtemperatur ca. 20°C – 25°C.

Verhältnis Volum Fixiermittel / Volum Gewebe: 1 : 5.

# INFORMATION FÜR DEN KUNDEN

## UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER HISTOLOGIE



**HISTOLOGIE**  
Art.-Nr. 374  
**Versandröhrchen 5 ml mit Formalin\* 4% gepuffert**

**Verwendung**  
Histologie, sehr kleine Biopsien (wenige mm Durchmesser, z.B. Magen-Darm Biopsien)



Art.-Nr. 375  
**Versandröhrchen 20 ml mit Formalin\* 4% gepuffert**

**Verwendung**  
Histologie, Kleinbiopsien (z.B. kleine Hautexzise)



Art.-Nr. 362  
**Versandröhrchen 40 ml mit Formalin\* 4% gepuffert**

**Verwendung**  
Histologie, Biopsien und kleine Exzise (z.B. Hautexzise)



Art.-Nr. 361  
**Versandbehälter 250 ml ohne Formalin**

**Verwendung**  
Histologie, grosse Biopsien (Exzise bis etwa 5cm)



Art.-Nr. 364  
**Versandbehälter 500 ml ohne Formalin**

**Verwendung**  
Histologie, sehr grosse Proben (Exzise bis etwa 10cm)



**ZYTOLOGIE**  
Art.-Nr. 350  
**Objekträgerhülle leer Verwendung**

**Verwendung**  
Schutzhülle für 2 Objektträger



Art.-Nr. 351  
**Objekträger mit Mattstreifen (50 Stück)**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche und allgemeine Zytologie

\*Azide Produkt; unbedingt stochtrinsaufnahmen beachten!



Art.-Nr. 365  
**ThinPrep «Test-Pap», Plateau à 25 Stück**

**Verwendung**  
Flüssigkeitsmethode, Zytologie



Art.-Nr. 369  
**ThinPrep «Test-Pap» mit Versandhülle**

**Verwendung**  
Flüssigkeitsmethode, Zytologie



Art.-Nr. 366  
**ThinPrep-Versandkarton inkl. Styroporeinsatz**

**Verwendung**  
Versandkarton für 20 ThinPrep «Pap-Test»



Art.-Nr. 345  
**Steriles Röhrchen (50 ml)**

**Verwendung**  
Sputum für allgemeine Zytologie



Art.-Nr. 426  
**Röhrchen mit Cytolyt**

**Verwendung**  
Feinnadelpunktionen, Punktate



Art.-Nr. 348  
**Urinversandflasche 100 ml**

**Verwendung**  
Urinzytologie



Art.-Nr. 387  
**Microscopy Fixationspray**

**Verwendung**  
Fixation von PAP-Abstrichen und Abstrichen allgemeiner Zytologie

\*Azide Produkt; unbedingt stochtrinsaufnahmen beachten!



Art.-Nr. 375  
**Wattestab Puritan**



Art.-Nr. 380  
**Holzspatel**

**Verwendung**  
Konventionelle PAP-Abstriche, Mundschleimhaut-Abstriche



Art.-Nr. 381  
**Plastikspatel Gynäkologie**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 289  
**Cytobrush / Spatel Kombipack (Medscand)**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 390  
**Cytobrush**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode, Mundschleimhaut-Abstriche



Art.-Nr. 391  
**Corvexbrush**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 392  
**Cytoprep**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 393  
**Cervibrush + Profile LBC**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 396  
**Szalay Spatel klein Nr. 1**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 397  
**Szalay Spatel mittel Nr. 2**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode



Art.-Nr. 398  
**Szalay Spatel gross Nr. 3**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode




Art.-Nr. 381  
**Szalay Spatel weiss Nr. 4**

**Verwendung**  
PAP-Abstriche, konventionelle und Flüssigkeits-methode

# INFORMATION FÜR DEN KUNDEN

## MELDUNGSPFLICHTIGE KRANKHEITEN

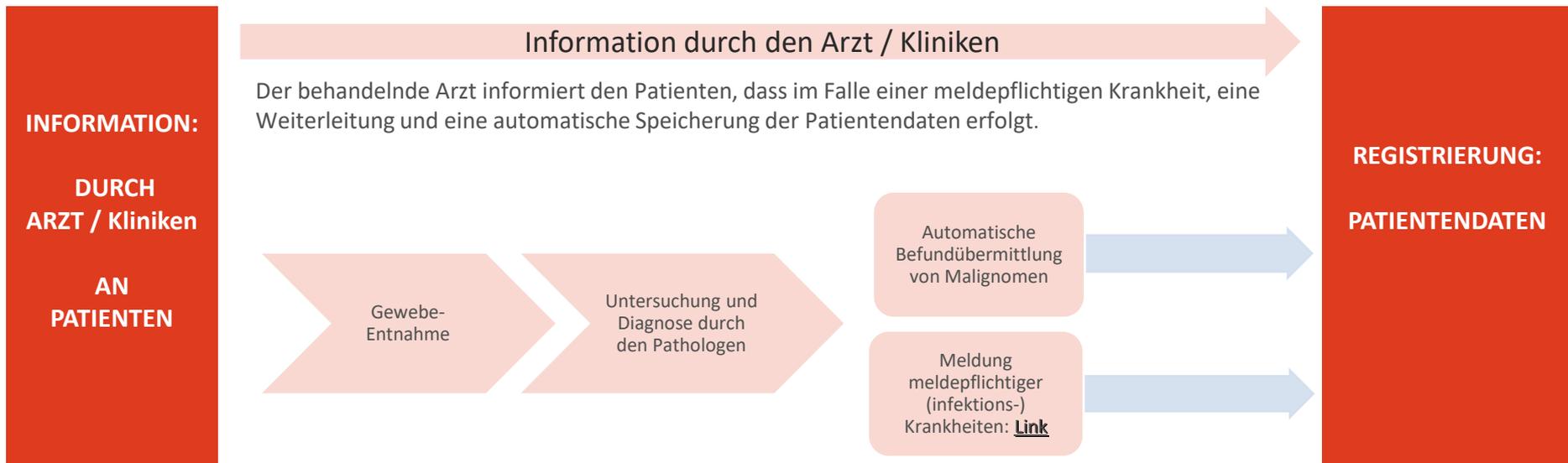

# INFORMATION FÜR DEN KUNDEN

## PROZESSBESCHREIB KUNDENREKLAMATION

